

# CASO CLÍNICO

Cirujano implantólogo

DR. EMILIO LUIS PORCAR

Endodoncista

Práctica privada. El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, Cádiz



Jata Endo

## Caso clínico con limas ESP Files Thermo Flex

Paciente varón

**Motivo de la consulta:** Acude a la clínica para segunda opinión y evitar extracción de la pieza

**Exploración clínica:** Acude a mi clínica un paciente, que había sido evaluado en una franquicia y otras dos clínicas privadas, le querían extraer la pieza y colocar implante. Presenta fístula en 3.6

**Diagnóstico:** Afectación en canal mesio vestibular del primer molar inferior izquierdo.

**Tratamiento:** Profilaxis y retratamiento de los canales.

**Procedimiento:** En la primera sesión retiramos relleno antiguo y lavamos, sale por la fístula los restos más importantes.

Retiramos gutapercha con limas ESP Files Thermoflex 25 .06, y en raíz palatina ampliamos con ESP Files Thermoflex 35 .04.

Desinfectamos con hipoclorito alternando con EDTA, y después de que extruyera hipoclorito por la fístula, lavamos con suero fisiológico y ponemos hidróxido de calcio hacia hueso, la raíz realmente afectada es la mesiovestibular.

**Resultado:** 10 días después viene sin dolor, sin drenaje, sin tumefacción y sin fístula.

Lavo nuevamente con hipoclorito y suero fisiológico alternos, ya no hay drenaje por el conducto. Paso MTA, coloco Gelatamp® condensado hacia el ápice en raíz mesio vestibular, calibrando con un condensador vertical. Relleno con Ah plus® y guttapercha.

Ahora a esperar, pero con alta probabilidad de que vaya a ir bien.

**Conclusión:** Las limas ESP Files Thermo flex permiten retirar la gutapercha antigua con las propias limas del sistema en cualquiera de sus diámetros y conicidad. Gracias a su diseño y a su superficie ESP-Escale, que le confiere un gran poder evacuador sin calentar en exceso. Sin cambiar de sistema, retratamos el conducto.

